

FIȘĂ TEHNICĂ DESOGEN

Ediție/Revizie:
01/01

Data ultimei revizii:
24.08.2021

Cod produs:
BIOC024-RO

❖ Avantaje

- ✓ Peste 90% ingrediente biodegradabile
- ✓ Nu decolorează după aplicare pe suprafețe netede și solide
- ✓ Eficiență demonstrată, inclusiv în condiții de murdărie
- ✓ Conține agenți tensioactivi cu capacitate bună de curățare și spumare redusă
- ✓ Nu conține: fenoli, clor, peroxizi

❖ Utilizare

Dezinfectarea suprafețelor de diverse tipuri, respectiv instrumentarului medical din domeniul sanitar-veterinar, respectiv zonele de colectivitate animală (grajduri, mașini / trenuri de transport).

❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se diluează 0,5/1% pentru soluția gata de lucru, în funcție de spectrul de activitate dorit. Produsul se poate utiliza pe suprafețe curate / murdare.

Tehnici de aplicare:

- se folosește un pulverizator manual
- echipament de nebulizare cu ceață rece/ umedă
- laveta curată din material sintetic (preferabil poliester/ polietilenă)
- imersie în cuvă/ recipient cu lichid

Pentru dezinfectia suprafețelor se folosește o cantitate suficientă de soluție 0,5% pentru acoperirea totală a acestora (4-12ml acoperă 1m²), prin tehnicile de aplicare direct pe suprafețe.

Pentru dezinfectare instrumentar prin imersie se folosește o soluție gata de lucru 0,5%. Instrumentarul curățat și uscat este plasat în cuva cu soluție și acoperit total de lichid. Timp de contact 30 minute. După dezinfectare, instrumentarul este clătit cu apă sterilă. Soluția din cuva de dezinfectare poate fi refolosită pentru maxim 5 seturi complete de instrumentar sau în 48 de ore de la umplerea cuvei.

Se utilizează pentru dezinfectarea diferitelor suprafețe din: complexele zootehnice, adăposturi pentru animale și mijloace de transport, clinici veterinare, laboratoare și secții de reproducere și creștere a animalelor. Dezinfectare cu soluția 0,5%, timp de contact 30 minute pentru focarele epizootologice înaintea instituirii măsurilor de curățenie.

Tip dezinfecție	Diluție	Tabel dozaj soluție lucru	Mod folosire
Nivel scăzut	0,25%	25 ml/10 litri apă	ștergere sau
Nivel mediu	0,50%	50 ml/10 litri apă	pulverizare
Nivel înalt	1%	100 ml/10 litri apă	nebulizare

Poate fi aplicat direct pe suprafețe din: plastic, metale (acoperit prin vopsire/ galvanizare, cupru, aluminiu, 314L, 316L, alimentar/ industrial), cauciuc, teflon, silicon, lemn, ceramică, sticlă, pavimente (beton, gresie, lemn, marmură, rășină, linoleum, covoare/ mochete). Produsul poate fi aplicat și pe suprafețe din zona de pregătire și servire a alimentelor (cantină, bucătărie), dar nu în contact cu acestea/ pe alimente.

Tip produs biocid: grupa principală I, PT 3.

❖ Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Bactericidă EN 1040	0,25%	30 minute
Bactericidă EN 1276	0,5%	15 minute
Bactericidă EN 13727	0,5%	60 minute
Bactericidă EN 1656	0,5%	30 minute
Bactericidă EN 14349	0,5%	30 minute
Bactericidă EN 14561	0,5%	60 minute
Fungicidă EN 1275	0,25%	30 minute
Fungicidă EN 1650	0,25%	60 minute
Fungicidă EN 1657	0,5%	30 minute
Fungicidă EN 13624	0,5%	15 minute
Fungicidă EN 14562	0,5%	60 minute
Sporicidă EN 13704	1%	60 minute
Sporicidă EN 14347	1%	60 minute
Micobactericidă EN 14348	1%	60 minute

❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100g produs: 10% Glutaraldehydă, nr. CAS: 111-30-8, CE: 203-856-5; 15% , ADBAC C12-C16 nr. CAS: 68424-85-1, CE: 270-325-2.
- Alte ingrediente: surfactanți, parfum, colorant, apă.
- Descriere lichid nediluat: lichid ușor viscos, de culoare verde, cu miros specific de glutaraldehydă și parfum.
- pH = 9 ±1
- Solubil în apă.

❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: www.klintensiv.com

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 2 ani de la data fabricației, respectiv 3 luni de la deschidere.

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.

❖ **Informații suplimentare, opinii de specialitate**

Consultați pagina web: www.klintensiv.com

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498.

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă asigurați că utilizați o variantă actualizată.