

## FIȘĂ TEHNICĂ KLINTENSIV ȘERVEȚELE UMEDE DEZINFECTANTE PENTRU SUPRAFEȚE

Ediție/Revizie:  
01/03

Data ultimei revizii:  
23.09.2021

Cod produs:  
BIOC035-RO

### ❖ Avantaje

- ✓ Utilizare ușoară cu eficiență ridicată în dezinfectare
- ✓ Special concepute pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor fără riscuri de contaminare
- ✓ Nu necesită dispozitive de aplicare, este gata de utilizare
- ✓ Nu conține coloranți, nu pătează, nu decolorează
- ✓ Eficiență demonstrată, inclusiv în condiții de murdărie
- ✓ Nu necesită clătire după utilizare
- ✓ Materialul șervețelului asigură a curățarea și dezinfectare adecvată datorită surfactanților cu spumare redusă
- ✓ Nu conține: peroxizi, aldehide, fenoli, clor, alcool, SLES, parabeni
- ✓ Prezintă capacitate bună de curățare și degresare

### ❖ Utilizare

Dezinfectarea suprafețelor de diverse tipuri, respectiv pavimentelor. Produsul se utilizează prin tehnica ștergerii suprafețelor. Modalitate adecvată de aplicare ce asigură o curățare și dezinfectare de înaltă calitate, fără riscuri de contaminare.

### ❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se utilizează ca atare, nu se diluează și nu necesită clătire (se evaporă). Produsul se utilizează pe suprafețe curate/ murdare, iar acesta prezintă acțiune rapidă.

Tehnici de aplicare:

- Ștergerea suprafețelor utilizând șervețele impregnate

Pentru dezinfectia suprafețelor se folosește o cantitate suficientă pentru acoperirea totală a acestora (consum: 1-3 buc/1m<sup>2</sup>).

Dezinfectia instrumentarului / dispozitivelor/ echipamentelor medicale: se folosește o cantitate suficientă pentru acoperirea totală a acestora cu un film de lichid, iar timpul de contact este cuprins între 10-60 minute.

Produsul asigură o modalitate ușoară, sigură și eficientă pentru curățarea și dezinfectarea echipamentelor utilizate în scop de diagnostic (electrozi EKG, stetoscop, sonde ecografice, brățări pentru monitorizarea funcțiilor vitale, mese de consult, ș.a.

Timpul de contact de 60 minute asigură a dezinfectare înaltă cu spectru: fungicid, sporicid, micobactericid și tuberculicid.

Produsul este ideal utilizării: în spitale, clinici, laboratoare, policlinici, cabinete medicale, ambulanțe, inclusiv zonele de birou ale acestora sau zonele de cantină. Este ideal pentru utilizarea pe suprafețe intens accesate de oameni cu un risc mare de contaminare (spații de triaj/așteptare, vestiare, camere pentru consultații, ambulanțe).

Prin modul de prezentare al produsului (șervețele impregnate) se asigură un nivel înalt al procesului de dezinfectare.

Produsul este compatibil cu suprafețe metalice neacoperite (aluminiu, cupru, zinc, bronz, argint, aur, inox medical/ alimentară/ 314L/ 316L), metalice acoperite (vopsea, galvanizate, email, rășini), plastice de diferite tipuri (PP, PE, HDPE, ș.a.), cauciuc, silicon, teflon, linoleum, lemn, compozite minerale (gresie, faianță, marmură, beton, ș.a.).

A se evita aplicarea produsului direct pe suprafețe aflate în contact cu alimentele.

Tip produs biocid: grupa principală I, PT 2.

### ❖ Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Bacterică EN 13727	97%	5 minute
Bacterică/Fungică EN 13697	100%	5 minute
Bacterică EN 16615	100%	5 minute
Levurică/Fungică EN 13624	97%	5 minute
Bacterică EN 14561	100%	15 minute
Levurică EN 14562	100%	10 minute
Fungică EN14562	100%	60 minute
Sporică EN 13704	98%	60 minute
Micobacterică/ Tuberculocică EN 14348	98%	60 minute
Micobacterică/ Tuberculocică EN 14563	100%	60 minute
Virucică limitat EN 14476	80%	5 minute
Bacterică EN 13697 (MRSA)	80%	5 minute

### ❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100g produs: 0,34% Clorură de didecildimetilamoniu CAS:7173-51-5, CE: 230-525-2 și 0,09% Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alcildimetil, cloruri CAS: 68391-01-5, CE: 269-919-4.
- Alte ingrediente: surfactanți, agent de chelatizare, parfum și apă
- Descriere soluția de impregnare: lichid incolor, cu miros parfumat
- pH = 10,8 ±0,5
- Dimensiuni șervețel: Lxl = 190x160mm
- Material șervețel: poliester și viscoză
- Solubil în apă (lichid)

### ❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: [www.klintensiv.com](http://www.klintensiv.com)

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

## ❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 3 ani de la data fabricației, respectiv 1 lună de la deschidere.

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.

## ❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: [www.klintensiv.com](http://www.klintensiv.com)

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: [office@klintensiv.com](mailto:office@klintensiv.com), telefon: 021/44.81.498.